

Технічний паспорт виробу

KK-505A1 Series

Пневматичний поліцентричний колінний вузол

Зовнішній вигляд і технічні характеристики

Артикул: KK-505A1



колір / логотип

Застосування пневматичного поліцентричного колінного вузла

Встановлення:

1) Збір:


Збирати потрібно у напрямку від куксоприймача до стопи з використанням адаптерів

2) Вирівнювання:

- Лінія ваги куксоприймача повинна проходити через верхню передню вісь коліна, так як показано у вигляді вертикальної лінії на малюнку нижче.
- Щоб підвищити стійкість, протезисти можуть зміщувати лінію ваги вперед до верхньо-передньої осі.

3) Для регулювання згинання та розгинання вузла:

1. Закрутіть стабілізуючий гвинт (#42), щоб зменшити стійкість з'єднання вузла; послабте стабілізуючий гвинт (#42), щоб збільшити стійкість з'єднання суглобу. Відпустіть і знову закрутіть стопорний гвинт (#43) до та після регулювання стійкості. Якщо немає стопорного гвинта (#43), виконайте налаштування безпосередньо на регулювальному гвинті (#42).
2. Згинання та розгинання вузла можна регулювати за допомогою двох фіксуючих гвинтів («F» для згинання / «E» для розгинання). Для цього треба закрутити та послабити гвинт контролю (#25).

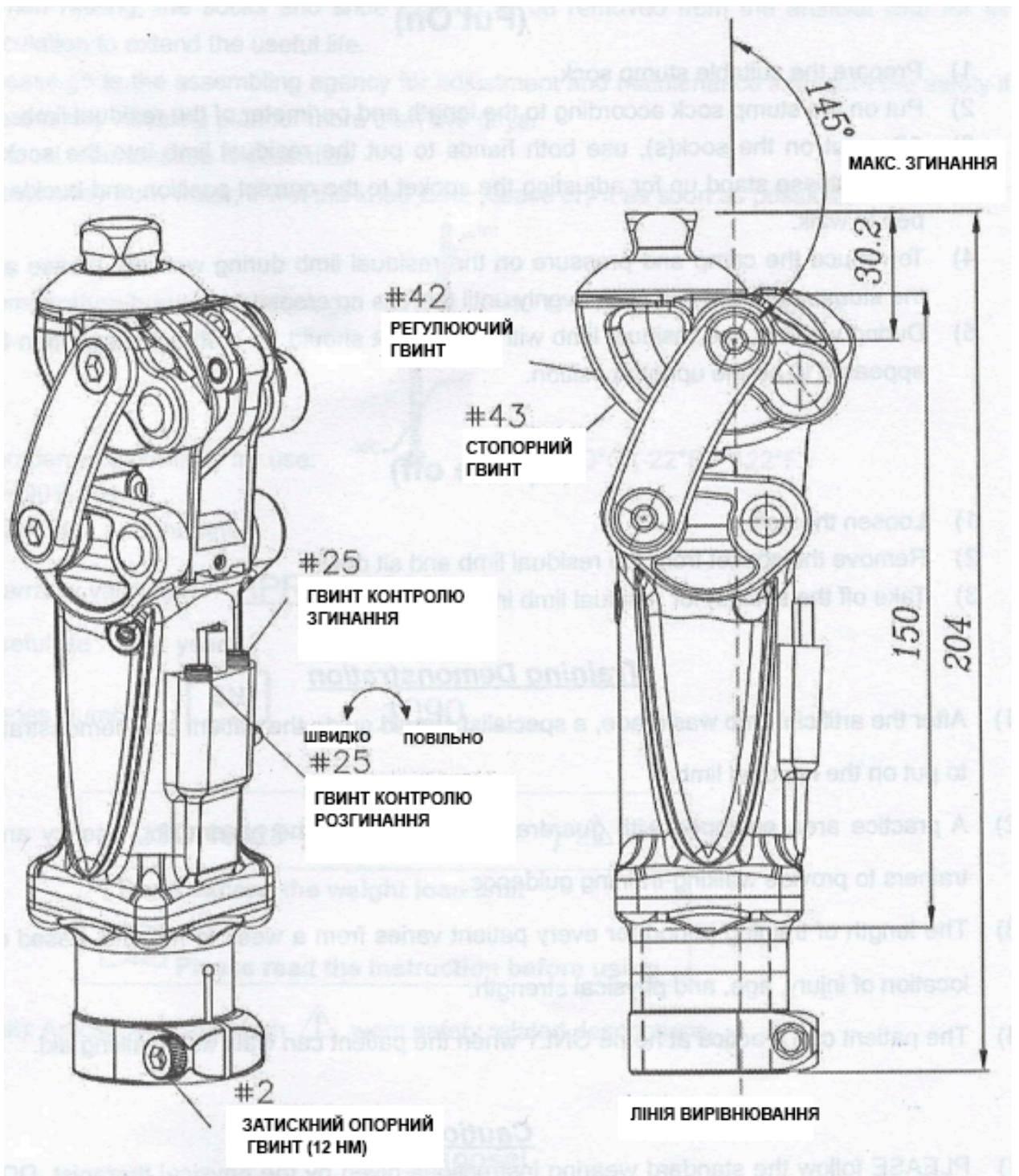

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Загальна довжина	204 мм
Висота конструкції	150 мм
Вага	740 г
Максимальний кут згинання	145 градусів
Максимально допустиме навантаження	100 кг

Гарантія: 18 місяців

Термін дії гарантії: **APR.06.2023**

Термін безпечного використання: чотири роки

Серійний номер:

SN

1090

0328 – «P5» – «100 кг» *) 
*) Не перевищуйте максимально допустиму вагу истувача
Перед використанням ознайомтесь з інструкцією

(Примітка): пункти, позначені знаком  пов'язані із безпекою.

Утилізація:

Необхідно утилізувати відповідно до місцевих та державних нормативних актів.



KEN DALL ENTERPRISE CO., LTD

NO. 150, QIONGLIN S. RD., XINZHUANG DIST.,
NEW TAIPEI CITY 24264, TAIWAN, R.O.C.

TEL: +886-2-2202-2726, FAX: +886-2-2202-2568

E-Mail: Export.info@kendall.com.tw

КЕН ДАЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗ КО., ЛТД
НОМЕР. 150, ЦЮНЛІНЬ С. РД., СІНЬЧЖУАН ДІСТР.,
НОВИЙ ТАЙБЕЙ 24264, ТАЙВАНЬ, РЕСПУБЛІКА КИТАЙ
ТЕЛ: +886-2-2202-2726, ФАКС: +886-2-2202-2568

E-Mail: Export.info@kendall.com.tw